

**Manuale Utente**

# **Pulsantiera**

**D898**



**Guidosimplex**

[www.guidosimplex.it](http://www.guidosimplex.it)

**Gentile Cliente,**

*grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.*

*Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.*

*I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.*

*Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.*


*Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.*

**Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.**



## PULSANTIERA

Una piccola pulsantiera, posta a destra del volante in prossimità della leva tergicristallo, consente di azionare le luci, gli indicatori di direzione ed il clacson con la mano destra e senza abbandonare il volante. Per favorire la visione notturna dei pulsanti vengono utilizzati dei LED luminosi. I comandi originali rimangono inalterati.

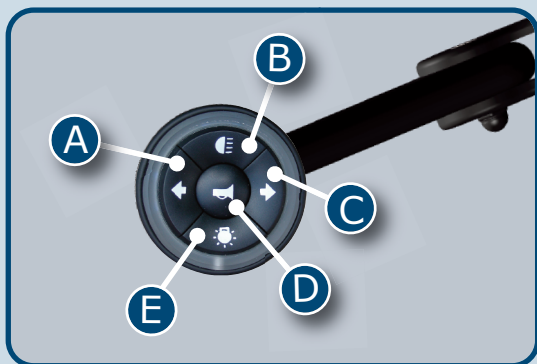

- A** - INDICATORE SINISTRO
- B** - LAMPEGGIO E CAMBIO LUCI
- C** - INDICATORE DESTRO
- D** - CLACSON
- E** - LUCI DI POSIZIONE

## ATTIVAZIONE DISPOSITIVO

Nell'abitacolo della vettura è presente un interruttore **A** installato in una posizione facile da raggiungere.



PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO:

- 1** AVVIARE IL MOTORE
- 2** ATTIVARE IL DISPOSITIVO PORTANDO L'INTERRUTTORE (A) IN POSIZIONE ON (1)





**Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.**

**Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet**

**[www.guidosimplex.it](http://www.guidosimplex.it)**

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



**Guidosimplex S.r.l.**  
**Via del Podere San Giusto, 29**  
**00166 Roma**  
**Tel. 06 6152801 r.a.**  
**Fax 06 61528036**  
**infoclient@guidosimplex.it**  
**www.guidosimplex.it**

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO